



# SHERACAST

## Empfohlene Mischungsverhältnisse von Einbettmassenpulver : SHERALIQUID

Unsere Empfehlungen basieren auf Testergebnissen unseres Labors und sind Richtwerte. Verschiedene Faktoren vor Ort wie z. B. die Raumtemperatur, die Luftfeuchtigkeit oder die Einstellungen des Rührgerätes können die Ergebnisse beeinflussen. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Bei technischen Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

	Pulver	Gesamtflüssigkeit		SHERALIQUID	+	entmineralisiertes Wasser
Modellherstellung Geldublierung	100 g	19 ml	davon	13,3 ml (70 %)	+	5,7 ml (30 %)
Modellherstellung Silikondublierung	100 g	21 ml	davon	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
Überbettung	100 g	21 ml	davon	10,5 ml (50 %)	+	10,5 ml (50 %)
	400 g	84 ml	davon	42,0 ml (50 %)	+	42,0 ml (50 %)
Lichtwachs	100 g	21 ml	davon	16,8 ml (80 %)	+	4,2 ml (20 %)
	600 g	126 ml	davon	101,0 ml (80 %)	+	25,0 ml (20 %)