

ABDRUCKDESINFEKTION

Präparat zur Desinfektion aller dentaler Abformmaterialien

Préparation pour désinfection de tout matériau pour empreintes dentaires

[de]

Hinweise zur Anwendung

Die betreffende Abformung in die gebrauchsfertige Desinfektionslösung einlegen und nach der empfohlenen Einwirkzeit wieder entnehmen. Die Abformung muss vollständig mit der Lösung bedeckt sein. Alginate und Hydrokolloiden nur kurz eintauchen und abtrocknen lassen. Die Abformung danach mit Wasser abspülen. Nicht mit Reinigern oder anderen Desinfektionsmitteln mischen. Je nach Verschmutzungsgrad ist die Gebrauchslosung zu erneuern (RKI-Empfehlung: Mindestens arbeitstätiglich). Nur für professionelle Anwender.

Sicherheitshinweise

H 412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Einwirkzeiten

Bakterien (inkl. MRSA) nach VAH, EN 13727, EN 14561 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

Candida albicans nach VAH, EN 13624, EN 14562 (hohe Belastung): Konz. 1 min.

„Begrenzt viruzid“ (behüllte Viren wie z.B. HBV, HIV, HCV) nach DVV/RKI und EN 17111 (niedrige Belastung): Konz. 5 min.

TbB (M. terrae im Suspensionstest, niedrige Belastung): Konz. 15 min.

Inhaltsstoffe nach VO 648/2004/EG

Enthält < 5% kationische Tenside, Parfüm

MD CE 0124

Vertrieb / distribution:

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG

Espohlstr. 53 · 49448 Lemförde · Germany

www.shera.de · info@shera.de · Tel. +49 (0) 5443 99 33 - 0

[fr]

Remarques concernant l'application

placer les matériaux de prise d'empreinte dans la solution de désinfection prête à l'emploi puis retirer-les à la fin du temps d'action recommandé. Ils doivent être complètement recouverts par la solution. N'immergez pas les alginates et les hydrocolloïdes qui brièvement, puis laissez sécher. Rincez ensuite le matériau de prise d'empreinte à l'eau. Ne pas mélanger à d'autres produits détergents ou solutions désinfectantes. La solution employée est à changer régulièrement selon le degré de salissure (recommandation de l'Institut Robert Koch (RKI) : au moins une fois par jour). Réservez aux utilisateurs professionnels.

Mentions de danger

H 412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Élimination du contenu / du contenant conformément aux prescriptions locales / régionales / nationales / internationales.

Temps d'action

bactéricide (y compris MRSA) selon VAH (Association pour l'hygiène appliquée), EN 13727 et EN 14561 (saleté): Conc. 1 min. Candida albicans selon VAH, EN 13624 et EN 14562 (saleté): Conc. 1 min.

« Virucide limité » (virus enveloppé, p. ex. VHB, VHC, VIH) selon DVV (Association allemande pour le contrôle des maladies virales) / RKI (Institut Robert Koch) et EN 17111 (propriété) : Conc. 5 min.

TbB (M. terrae en test de suspension, propriété) : Conc. 15 min.

Composition

Ordonnance 648/2004/CE : Contient < 5 % de tensioactifs cationiques, parfums



Prisman GmbH

Otto-Hahn-Ring 6-18, 64653 Lorsch

Tel. +49 (0) 6251-866980-0