

Einsatzgebiet

Für Nicht-Edelmetall Legierungen.

SHERAFLUX NE ist ein Spezial-Flußmittel mit oxid-reduzierenden Eigenschaften. Es enthält nicht-metallische Stoffe, welche die Bildung von Oxiden beim Löten verhindern.

Anleitung

Die Löttemperatur muß immer über der Arbeitstemperatur des Lotes liegen.

Lot in SHERAFLUX NE tauchen und die zu verlötende Stelle mit SHERAFLUX NE bestreichen. Beides mit der Lötflamme leicht antrocknen. Grundwerkstoffe gleichmäßig Erhitzen und zügig löten. Beim Erhitzen die Flamme nicht zu stark hin- und herbewegen, um eine Sauerstoffzufuhr zu vermeiden.

Gewährleistung

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG ist nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert und garantiert für die Produkte, aufgrund eines aufwendigen Qualitätssicherungssystems, eine einwandfreie Qualität. Unsere Anwenderempfehlungen beruhen auf in unserem Versuchslabor ermittelten sog. Richtwerten. Diese Werte können nur garantiert werden, wenn die angegebenen Verfahrensschritte eingehalten werden. Der Benutzer ist für die Bearbeitung der Produkte selbst verantwortlich. Für fehlerhafte Ergebnisse wird nicht gehaftet, da SHERA keinen Einfluß auf die Weiterverarbeitung hat. Eventuell dennoch auftretende Schadensersatzansprüche beziehen sich ausschließlich auf den Warenwert unserer Produkte.

