

Indication

Pour les alliages non-précieux

SHERAFLUX NE est un flux spécial aux propriétés réduisant les oxydes. Il contient des matières non-métalliques, lesquelles empêchent la formation d'oxydes lors de la soudure.

Mode d'emploi

Tremper la soudure dans SHERAFLUX NE et appliquer un peu de SHERAFLUX NE sur les parties à souder. Sécher les deux parties à souder ainsi que la soudure avec un peu de chaleur à l'aide de la flamme. Ensuite chauffer les matériaux ensemble et procéder à la soudure rapidement. Lorsque vous chauffez, éviter de bouger la flamme trop fortement, afin d'éviter un ajout d'oxygène.

Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.