

Aplicación

Para aleaciones de metales no preciosos.

SHERAFLUX NE es un fundente especial con características de óxido reducido. Contiene materiales no metálicos los cuales impiden la formación de óxidos durante la soldadura.

Indicación

La temperatura para la soldadura siempre tiene que ser más alta que la temperatura a trabajar.

Inmergir la soldadura en SHERAFLUX NE y pintar el punto a soldar con SHERAFLUX NE. Empezar a secar los dos un poco con la llama para soldar. Calentar los materiales simultáneamente y soldar rápidamente. Durante el calentamiento no mover la llama demasiado para poder impedir un aporte de oxígeno.

Garantía

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG posee la certificación DIN EN ISO 13485 y garantiza una total calidad de los productos gracias a un costoso sistema de aseguramiento de la calidad. Las recomendaciones que hacemos a nuestros usuarios están basadas en los datos de referencia obtenidos en nuestro laboratorio de ensayos. Estos datos pueden garantizarse solamente si se siguen los procedimientos descritos. El usuario es el único responsable de la manipulación del producto. No asumimos responsabilidad alguna por resultados defectuosos, ya que SHERA no tiene ningún control sobre la manipulación posteriora del producto. Eventuales reclamaciones de indemnización por daños podrán referirse exclusivamente al valor de nuestros productos.