

Reinigungs- und Pflegehinweise

für SHERAprint-splint taff & flex





Reinigungs- und Pflegehinweise

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

damit Sie lange Freude an Ihrem Splint, Repositioner, Mouth- oder Nightguard haben, empfehlen wir Ihnen:

Tägliche Reinigung

Zur täglichen Reinigung lauwarmes Wasser, eine weiche Zahnbürste oder Flüssigseife verwenden. Danach gut abspülen.

Hinweise

- Keine Zahnpasta verwenden, die Schleifpartikel sind grob und zerkratzen die Oberfläche.
- Keine Säuren oder Lösungsmittel verwenden.
- Keine Mundspülung verwenden.



SHERA Werkstoff-Technologie GmbH

Espohlstr. 53 | 49448 Lemförde | Deutschland Tel.: +49 (0) 5443-9933-0 | www.shera.de