

Gebrauchsanweisung Organic Einweg Scanbodys

Produktbeschreibung	Organic Einweg Scankörper werden bei intraoralen Scannings im Mund der Patienten platziert. Der Scankörper wird direkt auf die Implantate gesetzt und dient dazu, die genaue Position und die genaue Angulation des jeweiligen Implantats zu identifizieren.
Material	PEEK
Scaninstruktionen	<p>Die Details für den Scanner Einsatz finden Sie im empfohlenen Protokoll des verwendeten Scanners.</p> <p>Vor jeder Verwendung müssen Scan-Abutments mit sauberem Wasser gereinigt und gespült werden. Nach der Reinigung müssen die Scankörper bei 121°C für 15 Min. oder bei 134°C für 3 Min. autoklaviert werden. Organic Intraoral Scanbodies sind hochpräzise Werkzeuge; daher dürfen sie nicht genutzt werden, solange sie noch vom Autoklavieren erwärmt sind. Die Scanergebnisse könnten dadurch verfälscht werden. Scankörper dürfen erst bei Zimmertemperatur von 18-25°C verwendet werden, Scan-Abutments sind bis maximal 37°C verwendbar</p> <p>Direkt vor Beginn des Scanvorgangs müssen alle provisorischen Abutments, die Abdeckschraube, das Einheilabutment o. Ä. von Implantat entfernt werden, auf das der Scankörper platziert werden soll. Stellen Sie sicher, dass die Fläche, auf die der Scankörper gesetzt werden soll, so sauber wie möglich ist; es dürfen sich keine Ablagerungen, Flüssigkeiten oder Knochen- bzw. Weichgewebe darauf befinden. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass das gewählte Scan-Abutment für das gewählte Implantat oder Abutment geeignet ist.</p> <p>Ziehen Sie die Befestigungsschraube mit dem Schraubenzieher von Hand bis MAXIMAL 5Ncm fest. Wird der Scankörper zu fest angezogen, kann dies permanente Verformungen des Scankörpers und ein falsches Scanresultat zur Folge haben.</p> <p>Der Biss-Scan DARF NICHT durchgeführt werden, wenn sich der Scankörper noch an seinem Platz befindet. Er ist nicht dafür vorgesehen, der Kraft eines Bisses zu widerstehen. Falls der Patient während des Scanvorgangs auf das Abutment beißt, muss der Scankörper entsorgt werden.</p> <p>Die Scan-Abutments dürfen beim Einsetzen in das Implantat nicht gedreht werden. Nach dem Scannen muss der Scankörper entfernt werden. dazu muss die Befestigungsschraube wieder gelöst werden.</p> <p>Die Produkte dürfen nur von einem professionellen Anwender benutzt werden.</p>



Lagerung

Organic Einweg Scan Bodys sollten keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und sind bei Raumtemperatur (18-25°C) zu lagern. Wenn Die Scan-Abutments ohne Aufbewahrungsbox gekauft wurden, kann auch ein anderer Behälter verwendet werden, in dem die Scan-Abutments in systematischer Reihenfolge aufbewahrt werden können.

Nutzungsdauer

Der Organic Einweg-scanbody ist zum **einmaligen** Gebrauch bestimmt

