


## Gebrauchsanweisung Organic provisorisches Abutment

<b>Produktbeschreibung</b>	Organic provisorisches Abutment dient der Herstellung eines Provisoriums auf Implantatniveau. Für Einzelzahnlücken, teilbezahnte und unbezahnte Kiefer, anterior und posterior
<b>Chem. Zusammensetzung Schrauben</b>	Titanlegierung Ti6Al4V ELI
<b>Kontraindikation</b>	Keine bekannt
<b>Vorgehensweise</b>	Provisorisches Abutment in das Implantatanalog einbringen. Platzverhältnisse und Okklusion überprüfen, Änderungen ggf auf Abutment markieren. Dann patientenspezifisch individualisieren mit geeigneten kreuzverzahnten Fräsen. Dabei darf die Anschlußstelle zum Implantat nicht beschädigt werden. Opaquer nach Herstellerangaben auftragen, Krone aus Komposit modellieren oder alternativ einen konfektionierten Prothesenzahn anpolymerisieren, dabei darauf achten, dass der Schraubenkanal freigehalten wird. Provisorische Krone ausarbeiten und polieren. Beim Befestigen die vom jeweiligen Implantathersteller vorgegebenen Drehmomente beachten.
<b>Reinigung</b>	Die provisorischen Abutments werden unsteril ausgeliefert.
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	Sicherstellen, dass alle benötigten Teile, Hilfsmittel und Instrumente vollständig, funktionsfähig und in ausreichender Menge vorhanden sind. Patienten so lagern, dass die Gefahr der Aspiration der Teile minimiert wird.
 <b>Warnhinweise</b>	Diese Gebrauchsanweisung unbedingt vor Verwendung der provisorischen Abutments lesen. Provisorische Abutments dürfen nur ihrer Indikation entsprechend nach den allgemeinen Regeln für zahnärztliches/chirurgisches Handeln sowie unter Beachtung der Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften angewendet werden. Diese Gebrauchsanweisung reicht bei implantologisch unerfahrenen Behandlern nicht aus um eine fachgerechte Anwendung sicher zu stellen. Der Anwender muß mit zahnärztlicher Chirurgie und Prothetik vertraut sein. Die Verantwortung obliegt ausschließlich dem Behandler
<b>Aufbewahrung</b>	sauber und trocken unsteril Das Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt Bestellnummer LOT- Nr auf der Verpackung Warnhinweis Gebrauchsanweisung beachten Lagerung sauber, trocken, bei Zimmertemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt

