

Gebrauchsanweisung Organic Abutment-Schraube

Produktbeschreibung

Die Organical Abutmentschraube ist indiziert für die Fixation prothetischer Restaurationen an enossalen Zahnimplantaten.

Chem. Zusammensetzung Schrauben

Titanlegierung
Ti6AL4V ELI

Kontraindikation

Allergien gegen die Legierung oder deren Inhaltsstoffe können in seltenen Fällen auftreten.

Vorgehensweise

Stellen Sie sicher, dass die prothetische Restauration korrekt auf dem Implantat positioniert ist. Ziehen Sie die prothetische Schraube von Organical mit Hilfe eines geeigneten Werkzeugs mit dem empfohlenen Drehmoment an. Das empfohlene Anzugsdrehmoment ist auf dem Produktetikette angegeben.

Reinigung

Die Abutment-Schrauben werden unsteril ausgeliefert. Bevor die prothetische Schraube von Organical eingesetzt werden kann, muss sie zunächst mit Wasser und einer Bürste gereinigt und dann sterilisiert werden. Die empfohlene Sterilisationsmethode ist ein vollständiger Zyklus einer Dampfsterilisation mit Vorvakuumverfahren bei einer Temperatur von 134 °C (273 °F) für mindestens 3 Minuten oder bei einer Temperatur von 121 °C (250 °F) für mindestens 15 Minuten. Die Produkte sind 5 Minuten nach der Autoklavierung gebrauchsfertig.

Vorsichtsmaßnahmen

Die prothetische Schraube von Organical darf nur von zahnmedizinischem Fachpersonal verwendet und eingesetzt werden, das eine anerkannte zahnmedizinische Ausbildung absolviert hat. Für Laborarbeiten und Einproben der prothetischen Restauration muss eine Laborschraube verwendet werden. Die prothetische Schraube von Organical ist für die permanente Fixierung der fertigen Restauration vorgesehen.

Warnhinweise

Bei Verwendung höherer Anzugsdrehmomente als empfohlen können die prothetische Restauration, die Schraube und/oder das Implantat beschädigt werden. Die Verschraubung mit einem niedrigeren Anzugsdrehmoment als dem empfohlenen Wert kann ein Lösen der prothetischen Restauration zur Folge haben.

- Die prothetische Schraube von Organical ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Mehrmaliger Gebrauch kann zu Funktionsverlust und/oder Infektionen führen.
- Aufgrund der geringen Größe der prothetischen Schraube von Organical ist besondere Vorsicht geboten, um ein Verschlucken oder Inhalieren dieser Teile durch den Patienten zu vermeiden.

Hinweis zu MRT: Die prothetische Schraube von Organical wurde nicht auf Sicherheit, Erwärmung, Migration und Verträglichkeit in der Magnetresonanztomographie (MRT)-Umgebung geprüft

Aufbewahrung

Die prothetische Schraube von Organical sollte bei Raumtemperatur aufbewahrt und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Entsorgung

Muss als biologischer Abfall entsorgt werden



unsteril



Das Produkt ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt



Bestellnummer



LOT- Nr auf der Verpackung



Warnhinweis



Gebrauchsanweisung beachten



Lagerung sauber, trocken, bei Zimmertemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt



Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt



Organical CAD/CAM GmbH
Ruwersteig 43
12681 Berlin
Tel: +49 (0)30 549934 200
Fax: +49 (0)30 543784 32
organical@cctechnik.com
www.cctechnik.com